

Puczeki do oczu w szafce Cederroth Eye Wash Cabinet

Cena brutto: 517.33 PLN

Cena netto: 517.33 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/puczki-do-oczu-w-szafce-cederroth-eye-wash-cabinet-ref-51011040/>



□ Zestaw do płukania oka Cederroth Eye Wash Cabinet to niezawodne rozwiązanie dla miejsc, w których istnieje ryzyko kontaktu oczu z substancjami chemicznymi, pyłem lub innymi zanieczyszczeniami. Umożliwia szybki dostęp do dwóch butelek płukanki do oczu Cederroth 500 ml, które można używać jednocześnie zapewniając skuteczne płukanie obu oczu.

□ Płuczki do oczu Cederroth neutralizuje wartość pH w oku. Roztwór neutralizuje kwasy i zasady, co przynosi szybszy efekt niż w przypadku zwykłego roztworu soli kuchennej. Oddziaływanie jest silniejsze w przypadku zasad niż kwasów,

□ Dzięki solidnej konstrukcji i zamykanej obudowie płuczki są zawsze czyste i gotowe do użycia. Przezroczysta pokrywa pozwala na szybkie sprawdzenie stanu płynów, a montaż na ścianie zapewnia łatwy dostęp w nagłych sytuacjach.

Co zawiera zestaw do płukania oczu

- 2x butelki płukanki do oczu Cederroth 500 ml – skuteczny roztwór neutralizujący kwasy i zasady.
- Szafka ochronna – zapobiega zabrudzeniu i uszkodzeniu płuczek, umożliwia łatwy montaż na ścianie.
- Ilustrowana instrukcja użytkowania – pomaga w szybkim zastosowaniu w nagłych przypadkach.
- Przezroczysta pokrywa – pozwala na szybkie sprawdzenie zawartości i stanu płuczek.

Gdzie sprawdzi się szafka Cederroth Cabinet?

- Zakłady przemysłowe i produkcyjne
- Laboratoria i magazyny
- Warsztaty i centra logistyczne
- Miejsca, gdzie występuje ryzyko urazów oczu spowodowanych substancjami chemicznymi lub pyłem

Najważniejsze cechy szafki Cederroth Cabinet

- Kompletny zestaw pierwszej pomocy – zawiera dwie butelki płukanki do oczu 500 ml.
- Możliwość użycia obu butelek jednocześnie – umożliwia skuteczne płukanie obu oczu.
- Przezroczysta pokrywa ochronna – szybka kontrola stanu płuczek i ich wymiana.
- Montaż na ścianie – łatwy dostęp do płuczek w nagłych przypadkach.
- Zamykana szafka – chroni płuczki przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
- Ilustrowana instrukcja użytkowania – zapewnia łatwą obsługę i szybkie zastosowanie.
- Ergonomiczne butelki – anatomiczny dozownik ułatwia aplikację płynu.
- Butelki łatwe w użyciu, posiadają dopasowaną do oka końcówkę do płukania dającą obfity strumień roztworu,

- Butelkę wyciąga się z szafki prostym ruchem ręki, po wyciągnięciu jest ona już otwarta i gotowa do użycia,
- Butelka wyposażona w wanienkę z korkiem chroniącym od kurzu.
- Zielone tworzywo, z którego wykonano szafkę, zawiera ponad 64% plastiku z recyklingu,
- Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE.

J a k u y w a p u c z k i d o o c z u C e d e r r o

1. Otwórz szafkę i wyjmij butelkę.
2. Butelki otwierają się automatycznie w momencie ich wykręcenia z szafki i od razu można rozpocząć przemywanie.
3. Ściśnij butelkę, kierując strumień płynu od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka. Jeśli to konieczne, przytrzymaj powieki palcami, aby nie zamykały się odruchowo.
4. Płucz przez kilkanaście minut, aby dokładnie usunąć substancje drażniące.
5. Jeśli to konieczne, powtórz czynność z drugą butelką.
6. Po zakończeniu płukania skonsultuj się z lekarzem.

P a r a m e t r y t e c h n i c z n e

- wymiary: 192 x 296 x 92 mm
- kolor szafki: zielony,
- wymiary płukanki: Ø 6,6 x 23,5 cm,
- pojemność: 2 x 500 ml,
- okres przydatności: 5 lat.

J a k u y w a p u c z k i d o o c z u C e d e r r o

1. Otwórz szafkę i wyjmij butelkę.
2. Butelki otwierają się automatycznie w momencie ich wykręcenia z szafki i od razu można rozpocząć przemywanie.
3. Ściśnij butelkę, kierując strumień płynu od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka. Jeśli to konieczne, przytrzymaj powieki palcami, aby nie zamykały się odruchowo.
4. Płucz przez kilkanaście minut, aby dokładnie usunąć substancje drażniące.
5. Jeśli to konieczne, powtórz czynność z drugą butelką.
6. Po zakończeniu płukania skonsultuj się z lekarzem.

Parametry techniczne

- wymiary: 192 x 296 x 92 mm
- kolor szafki: zielony,
- wymiary płukanki: Ø 6,6 x 23,5 cm,
- pojemność: 2 x 500 ml,
- okres przydatności: 5 lat.

